

先生もスタッフも全員女性です。

ときざね矯正歯科 2021年秋号

だから安心！だからやさしい！



Present for You



〒564-0031
大阪府吹田市千里山東 1-4-12-3F
TEL 06-6338-6712

洗浄剤

* 矯正装置(床装置、プレート、保定装置など)お手入れ

毎日使うものだから、きれいに保ちたいですね。当院でお勧めしている洗浄剤をお知らせします。

★リテナーシャイン

920 円 (150g 60 回分)



漂白成分やタンパク質分解酵素による優れた洗浄力でリテナーの汚れやいやな臭いを取り除きます。

- 高性能顆粒タイプで洗浄力、除菌力、消臭力に優れています。
- リテナー類をいためない、弱アルカリ性。

リテナーの汚れは何？	プラーク(歯垢) 細菌の塊 歯石 歯垢が固まったもの ステイン お茶やコーヒーなどに含まれている着色物質での歯の汚れやくすみ
どうしたら落とせる？	水洗いだけ 52% ブラッシング 72% 洗浄剤使用(リテナーシャイン30分) 90%
何が効いている？	タンパク質分解酵素 ヌルツキを分解 界面活性剤 ヌルツキを洗浄 過ホウ酸ナトリウム 酸素系漂白剤で除菌 弱アルカリ性 金属を錆びさせない

★矯正クリーン

2200 円 (2g×20包)、4包 170 円



主成分は有機酸(ピロリン酸ナトリウム)ですので、金属・プラスチックをきずつけず、**歯石の除去**に著しい効果があり、除菌効果もあります。

《装置の汚れ》

リテナーや矯正装置の汚れは、大きくプラーク(歯垢)・歯石・ステイン(着色)に分けられます。これらは装置の樹脂の部分の内部まで入り込み、水洗いだけでは落ちません。これらの汚れや臭いをもとからシャットアウトする為に洗浄剤を使用して下さい。歯磨きや食事等でリテナーをはずしている時に洗浄すると効果的です。

取り外しのできる装置:落ちにくい汚れには…

眼鏡用などの**超音波洗浄機**がおすすめです。超音波で水に振動を起こして細やかに洗い上げるため、目に見えない汚れまで落とせます。実際の使用に耐えるものは3000円以上のものとのこと。

sample



1台あるとアクセサリなどにも使えますね。ときざね矯正歯科ではご来院の際に取り外しのできる装置は、水洗いし汚れをとった後に、汚れに応じて**リテーナーシヤイン**または**矯正用クリーン**（歯石がついている場合）をぬるま湯とともに容器にいれ、超音波洗浄機に水を入れたところに、矯正装置をいれた容器を超音波洗浄します。

矯正装置を歯磨き粉で洗うのはやめましょう。以前、歯磨き粉で床装置を洗った方が、**装置が溶けてきた**と言われていました。専用の洗浄剤は装置を傷めないように工夫されています。

ときざね矯正歯科、移転しました

吹田市千里山東 1-4-12-3F (関大駅北口を上がった所です)

2021年9月から駐車場はタイムズを利用してください。詳しくはHPをご覧ください。順次更新していきます。



歯科衛生士の若松・早川の論文が掲載されました

原田有加里、早川博美：口腔筋機能療法の結果と協力度（練習回数と頻度についての検討.日本成人矯正歯科学会誌,28(1):27-33,2021.

結果：口腔筋機能療法(MFT)の練習回数(1回での練習回数)と頻度(1週間に何日したか)は、患者の口腔筋機能に影響を与える。それぞれの練習を各20回以上、週に5日以上すると口腔筋機能療法の結果が得られるという指標が得られました。

口腔筋機能療法の進捗は矯正治療結果にも連動します。矯正治療はただ通えばいいというものではなく、装置をしっかりと使用したか等、患者様の協力度によるものです。私たちはそのサポートと想っています。